

With SONIX for the people

SONIX

사용설명서

SW-VB15

REV. 01

▶ 반드시 본 사용설명서를
잘 읽어보신 후 사용해야 합니다.



SONICWORLD

| sonixkorea.com



사용설명서

반드시 본 사용설명서를 잘 읽어보신 후 사용하기 바랍니다.
읽으신 후 보증서와 함께 분실 되지 않게 보관하시기 바랍니다.

1 제품구성

2 안전한 사용을 위한 주의사항

- 안전한 취급 방법
- 안전한 전원 취급 방법
- 안전한 취급 및 설치 방법
- 안전한 사용 방법
- 안전한 손질 및 제품 보관 방법

3 음파진동 반신욕기의 특징점

- 반신욕기 특징
- 반신욕기 효과

4 제품의 구조

- 제어부 명칭 및 작동방법
- 작동부 설명
- 표시부 설명

5 제품 규격

- SW-VB15

6 진동기능이 있는 반신욕기 사용법

7 고장 신고 전 확인사항

8 A/S설명

9 폐 가전제품 처리 순서

10 제품 보증서

> 제품구성

2
3

본체



사용설명서 1본



전원케이블 1개



수평조절 받침 4개

> 안전한 사용을 위한 주의사항

> 안전한 취급방법

안전을 위한 주의사항은 반신욕기를 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 방지하기 위한 내용이므로 다음 사항을 반드시 지켜야 합니다.

주의 사항은 [경고]와 [주의] 두 가지로 구분되며, 각각의 의미는 다음과 같습니다.



경고

또는



주의

표시사항을 지키지 않을 경우 인체의 손상이나 물질적인 손실 등이 발생할 수 있습니다.

표시의 내용



준수



금지



분해금지



전원플러그



접지

> 안전한 전원 취급 방법

전원플러그가 본체에 눌리지 않아야 합니다.



준수

전원 플러그 단자에 먼지 등이 부착되어 있으면 마른 수건으로 깨끗이 닦아서 사용해야 합니다

전원 콘센트는 반신욕기 전용으로 사용해야 합니다. 여러 제품을 동시에 사용하면 퓨즈가 파손되거나 작동이 되지 않을 수 있습니다.

전원 코드 부분을 잡아당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 취급하면 안됩니다



금지

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 제품이나 물건에 눌러 파손되지 않도록 해야 합니다.

파손된 전원코드 및 콘센트는 사용하면 안됩니다. 전원코드가 파손된 경우 당사의 서비스 센터를 통하여 전원 코드를 교환해야 합니다. 감전이나 화상의 원인이 됩니다.

사용하지 않을 때는 반드시 전원 코드를 뽑아놓아야 합니다. 화재의 원인이 됩니다.

전원플러그를 콘센트에 뽑거나 꽂을 때는 본체의 전원을 먼저 끄고 손이 전원플러그 핀에 접촉되지 않아야 합니다. 감전의 원인이 됩니다.

본체 및 전원스위치 부분에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 넣지 않아야 합니다. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



전원플러그

제품에 연기가 나거나 타는 냄새가 나는 등의 이상 시에는 사용을 중지하고 전원코드를 제거해야 합니다

> 안전한 취급 및 설치 방법

제품을 설치할 때는 벽면에서 20cm 이상 간격을 띄워야 합니다.



준수

바닥이 튼튼하고 수평 한 곳에 설치 해야 합니다.
수평이 맞지 않은 상태에서 제품을 계속 사용하면 제품의 뒤틀림현상이 발생해 기능상 문제가 발생할 수 있습니다.

제품에 표시되어 있는 최대 전기용량과 사용할 콘센트의 전기 용량이 충분한지 점검이 필요합니다. 화재의 원인이 됩니다.

제품을 운반 할 경우 운반기구를 사용하며, 임의로 이동을 할 경우 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.

습기가 많은 곳에는 설치하면 안됩니다. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



금지

물과 접촉할 가능성이 있는 베란다 근처에는 설치 하면 안됩니다.
감전이나 화재의 원인이 됩니다.

본체에 올라 타거나 심한 충격을 주지 마십시오.
제품 파손의 원인이 됩니다.



분해금지

절대로 분해, 수리, 개조하면 안됩니다.
제품의 파손, 화재, 감전, 오작동의 원인이 됩니다.

> 안전한 사용방법 I

불안정한 자세에서 갑자기 진동 운동할 경우 신체에 무리가 올 수 있으므로 올바른 자세를 취한 후 사용해야 합니다.

진동 중에 의자에서 일어서면 상해의 위험이 있으므로 사용 후에는 START/STOP 버튼을 누르고 완전히 멈춘 상태에서 반신욕기 안에서 나와야 합니다.

진동 중 의자 위에서 장난 치거나 뛰면 인체의 상해 또는 제품의 손상을 가져 올 수 있습니다.



중수

본체내부 및 의자부의 틈에 이물질이 들어가지 않게 사용합니다. 화재나 감전의 원인이 됩니다.

노약자나 어린이가 제품 사용 시에는 보호자와 대동하여 주의를 기울이도록 해야 합니다.

노약자, 어린이, 제품사용법을 모르는 사람이 사용할 경우 조작법을 충분히 교육시켜 주십시오.

> 안전한 사용방법 II

스팀용 사우나 기기가 아닙니다.
본체 내부, 외부에 물, 습기 등이 있는 물체를 놓고 사용하지 마십시오.
화재나 감전의 원인이 됩니다.

적외선 램프의 빛을 직접 바라보지 마십시오.
눈이 부상을 입을 수 있습니다.

발열체에 신체가 접촉되지 않게 하십시오.
화상의 원인이 됩니다.



금지

바닥에 타올 등의 물체를 깔지 마십시오.
집열 현상으로 제품의 성능저하나 화재의 원인이 됩니다.

장시간 사용하지 마십시오. 저온 화상의 원인이 됩니다.

본체 및 의자 위에 물건을 쌓아두면 기기에 손상을 가져올 수 있습니다.

본체 내부, 의자 위에 휴대폰 등 전자기기를 올려두면
전자기기에 손상을 가져올 수 있습니다.

사용 중에 본체를 기울이거나 넘어뜨리지 마십시오.
파손 또는 화상이나 감전의 원인이 됩니다.

> 안전한 손질 및 보관 방법

청소할 때 제품에 물이 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.
진공청소기로 먼지를 제거한 후 마른 헝겊으로 닦아야 합니다.



준수

제품 외관을 청소할 때에는
재질에 맞는 세척제를 사용하여 닦아야 합니다.

오랫동안 사용하지 않을 때는 제품 외관을 깨끗이 청소하고
건조시킨 후 보관 해야 합니다.

청소하기 전에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아야 합니다.



금지

인화물질은 제품 가까이 놓으면 안됩니다.

물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 락스 등으로 청소하면 안됩니다

> 음파진동 반신욕기 특징점


> 반신욕기 특징

원적외선을 이용한 온열효과



원적외선은 일반 열과는 다르게 진피속을 투과해 자기 발열을 통해 신진대사를 촉진하고 장기간 체내에 축적된 유해금속의 배출을 도와 다이어트 효과 및 노화를 지연 시켜 줍니다.

음파진동운동을 결합

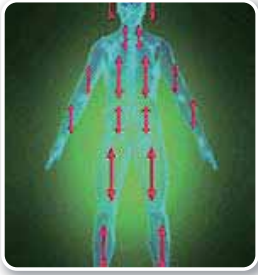

기존의 회전식 모터방식이 아닌 우퍼 스피커의 진동원리를 이용하여 정밀한 수직 음파장이 인체에 전달되도록 개발한 신개념 음파진동운동은 평소 자극받기 어려운 미세한 근육들의 근력강화와 골밀도 증가에 도움이 됩니다.

등받이에 바이오세라믹 약돌 장착



- 바이오세라믹 약돌은 열을 가하면 높은 원적외선 방사율을 나타내며 게르마늄 함량이 높습니다.
- 바이오세라믹 약돌은 탈취 및 항균효과가 높아 인체에 매우 이롭습니다.

조작이 쉬운 컨트롤러



온열모드와 진동모드에 대한 설정 및 조작이 간편해 누구나 편리하게 사용이 가능합니다.

양문형으로 출입이 편리함



양문형 제품으로 어느쪽 방향으로 제품을 두어도 출입이 편리합니다.

> 반신욕 효과

소닉스 음파진동 반신욕기는 집에서 편안하게 사우나를 즐길 수 있도록 설계되어 있습니다. 원적외선 건식사우나를 즐기면서 음파진동운동을 함께 할 수 있어 효과적인 건강관리가 가능합니다.

피로회복 도움

불면 및 숙취해소 도움

신진대사촉진 도움


여성 질환 개선 도움

노폐물 및 독소제거 도움


항균작용 / 다이어트효과

> 제품의 구조

> 주요 부품의 명칭

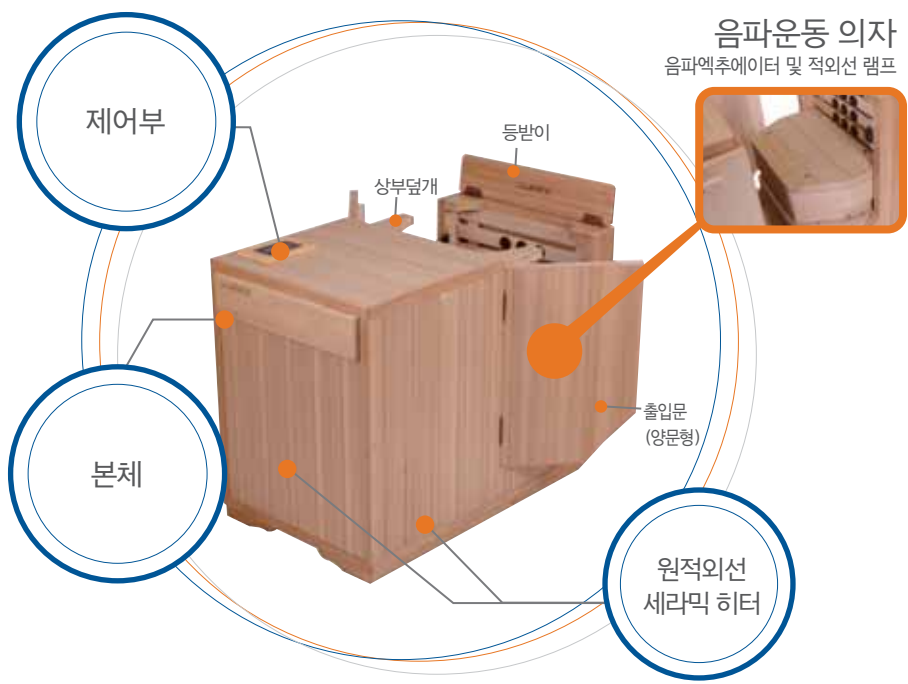

> 제어부/표시부 명칭 및 사용설명

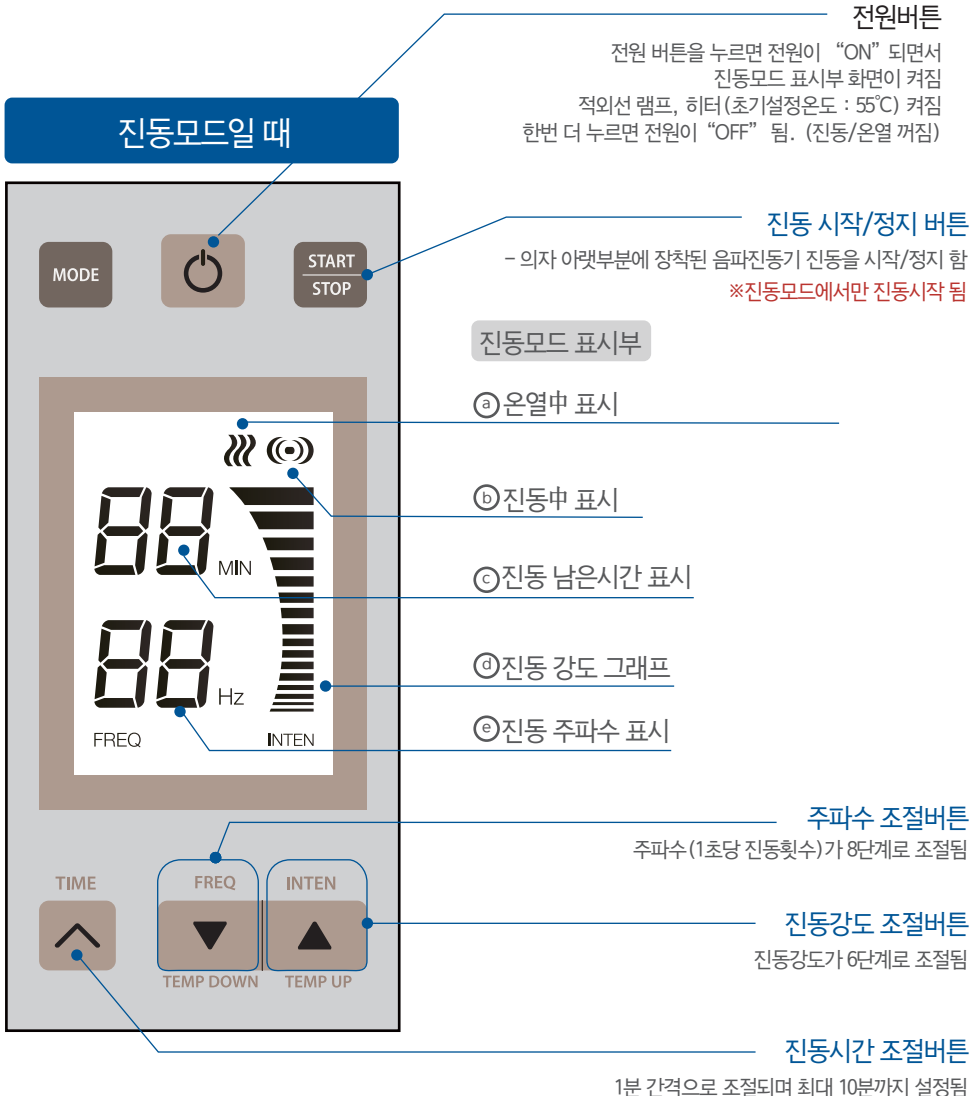

권장설정온도

본 제품의 권장설정온도는 55°C 입니다.


모드 선택버튼

진동모드 or 온열모드 선택버튼.
버튼을 누를때마다 모드가 변환됨.

온열모드 표시부

- a 온열중 표시
- b 진동중 표시
- c 온열 남은시간 표시
- d 온도표시 (설정온도/현재온도)

온열모드일 때

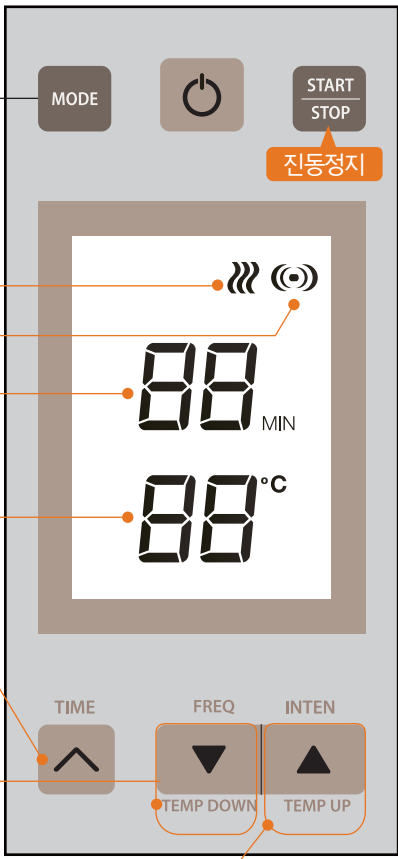

온열시간 조절버튼

10분간격으로 조절되며 최대 90분까지 설정됨

온도 내림 (↓) 버튼

설정온도 내림 버튼. 5°C 간격으로 감소하며 최저 30°C까지 설정됨.
(HO, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70)
※ HO (Heat Off) : 온열 꺼짐 설정 (히터 및 적외선 램프 꺼짐)

온도 올림 (↑) 버튼

설정온도 올림 버튼. 5°C 간격으로 증가하며 최대 70°C까지 설정됨. (초기설정온도 55°C로 기본 설정됨)

> 표시부 설명

a a



온열중 표시

- 온열 히터가 ON되어 있고 적외선램프가 켜졌을 때 표시됨.

b b



진동중 표시

- 진동모드에서 진동시작버튼(START/STOP)을 누르면 표시됨.

- 현재 진동기능이 작동 중 일때 표시됨.

c c



시간표시 (온열/진동 공통)

- 온열모드시 : 온열 시간 설정시 설정시간이 표시되며 설정이 끝나면 남아 있는 온열시간이 표시됨. (0~90분)

- 진동모드시 : 진동 시간 설정시 설정시간이 표시되며 설정이 끝나면 남아 있는 진동시간이 표시됨. (0~10분)

d



온도표시

- 온열모드시 : 정상시엔 현재 발열온도를 표시함.

제어부의 온도올림버튼(TEMP UP)과 온도내림버튼(TEMP DOWN)을 누르면 설정온도가 표시됨. (HO, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70)

- 설정온도에 도달하면 : 히터 및 적외선 램프가 꺼집니다.

- HO(Heat Off)선택시 : 온열기능이 Off 됩니다. (히터 및 적외선 램프 꺼짐)

c



음파진동 강도 그래프

- 진동모드에서 진동강도를 6단계로 나누어 표시함.

제어부의 강도조절버튼(INTEN)을 누르면 진동강도 그래프 막대가 증가하거나 감소한다. 막대가 높게 표시 될 수록 강도가 세짐.

d



음파진동 주파수 표시

- 진동모드시 : 진동 주파수(1초당 진동횟수)를 표시함. (5Hz ~ 25Hz 이며, 8단계로 조절됨.)

> 제품규격

> SW-VB15

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 모델명 | SW-VB15 |
| 설정온도 | 30°C~70°C |
| 운동 주파수 | 5 ~ 25Hz (강도 6 Step) |
| 최대 허용하중 | Max 100 Kg |
| 전원 | 220V, 60Hz |
| 소비전력 | 1,000W |
| Sonic Wave Generator | 110 φ |
| 사용환경 | 온도 : 40°C (32~104 ° F) 습도 : 0~82% |
| Size | 560mm X 1080mm X 750mm (H) |
| 중량 | 57Kg |
| 마감재질 | 적삼나무 / 햄락 |
| 색상 | 천연 나무색에 가까움 |






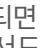

※ 위 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

> 음파진동 반신욕기 사용방법






> 반신욕기 사용전 확인사항

- 1 반신욕 하실 때는 가장 편안한 차림으로 반신욕수건을 함께 준비합니다.
- 2 마른손으로 콘센트에 전원 플러그를 연결 합니다.
- 3 반신욕기 상단에 접혀있는 등받이를 들어올려 바르게 세웁니다.
- 4 상부덮개를 본체 방향으로 밀어 넣고 앉을 자리를 확보합니다.
(덮개는 슬라이드식으로 수평조절됨.)
- 5 출입문을 열고 의자 위에 바르게 앉습니다.
4번에서 밀어 넣었던 상부덮개를 잡아당겨 하체를 덮어줍니다.
- 6 본 제품에 사용된 조절버튼은 UP/DOWN방식 입니다. 버튼을 누를 때마다 단계별로 값이 증가하고 최대값이 되면 다시 단계별로 감소합니다.
(온도조절버튼을 제외한 시간조절버튼, 강도조절버튼, 주파수조절버튼이 여기에 속함)

> 반신욕기 음파진동기능 사용방법

- 7 본체상단 제어부의 전원버튼 ()을 누르면 부저음과 함께 적외선 램프, 발열체가 켜지며 액정화면에 진동모드 표시부(진동시간, 주파수, 진동 강도 그래프가 표시)가 디스플레이 됩니다.
- 8 시간 조절버튼 ()을 눌러 원하는 진동 시간을 설정합니다.
설정가능 시간은 1~10분 이며 1분 간격으로 조절 됩니다.
- 9 강도조절버튼 ()을 눌러 원하는 강도를 설정 합니다. (6단계 그래프)
그래프의 막대가 높아 질수록 진동 강도가 세집니다.
- 10 주파수조절버튼 ()을 눌러 원하는 주파수를 설정 합니다.
설정 가능 주파수(1초당 진동횟수)는 5Hz ~ 25Hz 이며 8단계로 조절 됩니다.
- 11 진동시간, 주파수, 강도설정을 마쳤으면 진동시작버튼 ()을 눌러야 진동이 시작됩니다. 진동이 시작되면 진동모드아이콘 ()이 깜박거립니다.
진동중일때는 온열모드에서도 깜박거립니다.
- 12 진동을 정지하고 싶으면 진동정지버튼 ()을 눌러 진동을 정지 합니다.
진동중 전원버튼을 누르면 진동 및 온열이 모두 정지되며 전원이 OFF 됩니다.


> 반신욕기 온열기능 사용방법


- 13 MODE ()버튼을 누르면 온열모드 표시부가 액정화면에 디스플레이 됩니다.
- 14 액정화면에 온열모드 아이콘 ()이 보이고 현재온도와 기본 설정되어 있는 시간이 표시됩니다.
- 15 시간조절버튼 ()을 눌러 원하는 반신욕 시간을 설정 합니다.
누를 때마다 10분씩 증가하며 최대 90분까지 설정 가능 합니다.
- 16 온도감소버튼 () 또는 온도증가버튼 ()을 눌러 원하는 반신욕 온도를 설정 합니다. 설정 가능온도는 30°C ~70°C 이며 5°C간격으로 조절 됩니다.
버튼을 누른 후 3~4초가량 기다리면 설정온도는 저장되고 화면에는 현재온도가 표시됩니다.
※ 제품의 권장설정 온도는 55°C 입니다.
- 17 온열기능 끄기 : 온도설정화면에서 HO (Heat Off)를 선택하면 히터 및 적외선 램프가 OFF 됩니다.

예열기능 사용안내

본 제품은 예열기능을 별도로 설정하여 사용하도록 제공합니다.



예열기능이란 : 제품의 전원이 켜져 있을때 온열온도를 일정온도 (35°C)로 항상 유하지는 기능입니다. (단, 전원플러그를 뽑으면 이기능은 자동 해제됩니다.)

예열기능 설정방법 : 전원이 꺼져 있는 상태에서 TIME 버튼 ()을 약 2초가량 길게 눌러줍니다. 부저음과 함께 액정화면 표시부에 예열온도 35°C 만 표시되며 예열기능이 시작됩니다.

예열기능 해제방법 : 전원이 꺼져 있는 상태에서 TIME 버튼 ()을 약 2초가량 길게 눌러줍니다. 부저음과 함께 액정화면 표시부 화면이 OFF됩니다.



> 반신욕기 사용을 마치고 싶을 때

- 18 진동정지버튼()을 누릅니다.
진동시간이 남아 있어도 진동이 정지됩니다.
- 19 전원버튼()을 눌러 제품의 전원을 OFF 시킵니다.
전원버튼을 누르면 부저음소리와 함께 온열 및 진동이 종료되며 표시부, 적외선 램프, 발열체가 자동으로 “OFF” 됩니다.
진동시간 및 온열시간이 남아있어도 전원을 OFF 하실 수 있습니다.
- 20 전원 OFF 상태를 확인 한 후 상판덮개를 본체 방향으로 밀어 넣은후 출입구 문을 엽니다.
- 21 문이 열린 상태에서 자리에서 조금스럽게 일어나 반신욕기에서 나옵니다.
- 22 출입문을 닫고 상판덮개를 다시 덮어 줍니다.
- 23 반신욕기를 사용하지 않을때 상판덮개는 반드시 덮어 주시고 먼지나 이물질이 본체 내부에 들어 가지 않도록 큰 수건을 덮어 보관하시기 바랍니다.

> A/S 설명

※ 본 제품은 구입일로부터 품질 보증기간 1년 이내에 정상적으로 사용하는 상태에서 고장 날 경우, 무상으로 수리하여 드립니다.

| 제품고장 유형 | | 서비스 내역 | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------|
| | | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 | 구입 후 1개월 이내에 중대한 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 | - |
| | 수리 가능 | 무상 수리 | 유상 수리 |
| | 수리 불가능 | 제품 교환 | 감가상각 후 교환 |
| 소비자의 고의 또는 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생시 | 수리 가능 | 유상 수리 | 유상 수리 |
| | 수리 불가능 | 유상수리에 준하는 비용청구 후 제품 교환 | 별도 정하는 당사의 기준 |
| 기타 | 충격, 화재, 침수, 파손으로 인하여 수리가 불가능한 경우 유료서비스 | | |
| | 제품의 이동, 이사 등으로 인한 재설치 시 1회부터 유료서비스 | | |



A/S주의사항

- 1 중고품을 구입한 경우나 당사가 지정한 서비스 센터가 아닌 장소에서 수리한 경우, 정품이 아닌 부품 사용, 개조나 변조하여 기능에 이상이 발생한 경우 당사의 소비자 피해보상 기준이 적용되지 않습니다.
- 2 보증서의 제시가 없을 때 또는 보증서의 소정 항목이 기재되지 않았거나 위조되었을 경우에는 보증기간 중일지라도 실비를 받습니다.

> 고장 신고 전 확인사항

| 문의 내용 | 점검 내용 | 조치 내용 |
|----------------|--------------------------------------|---|
| 전원이 들어오지 않습니다. | 전압이 220V인지 확인합니다. | 110V인 경우 220V로 승압하는 변압기를 사용해야 합니다. |
| | 콘센트에 전기가 들어오는지 확인합니다. | 다른 전기제품을 콘센트에 연결하여 전기가 들어오는지 확인합니다. |
| | 전원콘센트에 전원 플러그가 바르게 연결되어 있는지 확인합니다. | 전원콘센트에 전원플러그를 바르게 연결합니다. |
| | 전원이 들어오는지 확인합니다. 또는 전원스위치를 확인합니다. | 전원 플러그를 콘센트에 바르게 연결합니다. 본체 뒤에 있는 전원스위치를 켭니다. |
| 사우나가 너무 뜨겁습니다. | 표시부에 온도가 올바르게 표시되는지 확인합니다. | 사우나가 뜨거운데 온도표시가 낮게 표시되면 사용을 중지합니다. 사용온도를 적절하게 조절합니다. |


| 문의 내용 | 점검 내용 | 조치 내용 |
|----------------------|---------------------------------|--|
| 사우나가 따뜻하지 않습니다. | 전원이 들어오는지 확인합니다. | 전원 플러그를 콘센트에 바르게 연결합니다. |
| | 표시부에 온도가 올바르게 표시되는지 확인합니다. | 사우나가 따뜻하지 않는데 온도표시가 높게 표시되면 사용을 중지합니다. 사용하기전 10~15분 정도 예열하여 사용합니다. |
| | “전원버튼” 을 눌러 봅니다. | 표시부에 정보가 나타나지만 빛이 나지 않는다면 전원을 끄고 당사 AS센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 적외선 램프에 빛이 나질 않습니다. | 본체에 전원이 켜져있고 온열모드가 작동중인지 확인합니다. | 본체 전원이 올바르게 켜져있는데 적외선 램프에 빛이 나질 않는다면 작동을 멈추고 당사 AS센터로 문의 주시기 바랍니다. |
| 진동운동 중 떨림과 소음이 심합니다. | 설치한 곳의 바닥이 기울어졌는지 확인합니다. | 전원플러그를 콘센트에서 뽑고 바닥이 평평하며서 단단한 곳으로 안전하게 제품을 이동합니다. |

> 고장 신고 전 확인사항


| 문의 내용 | 점검 내용 | 조치 내용 |
|---|---|---|
| “진동 시작/정지 버튼” 을 눌렀는데 진동이 시작하거나 정지되지 않습니다. | 버튼을 눌렀을 때 “뽁뽁” - “뽁뽁” 부저음이 두번 울리는지 확인합니다. | 부저음이 “뽁” 하고 한번만 울린다면 전원을 끈 후 2분뒤에 다시 사용해봅니다. 증상이 계속되면 사용을 중지 합니다. |
| “주파수 조절 버튼” 을 눌렀는데 주파수가 변경되지 않습니다. | “진동 모드” 인지 확인합니다. | 온열 모드라면 “온열/진동 선택 버튼” 을 눌러 진동모드로 변경합니다. “주파수 조절 버튼” 을 눌러봅니다. |
| | 버튼을 눌렀을때 부저음이 “뽁” - “뽁” 두번 울리는지 확인합니다. | 부저음이 “뽁” 하고 한번만 울린다면 전원을 끈 후 2분뒤 다시 사용해봅니다. 증상이 계속되면 사용을 중지합니다. |
| “강도 조절 버튼” 을 눌렀는데 진동 세기가 변경되지 않습니다. | “진동 모드” 인지 확인합니다. | 온열 모드라면 “온열/진동 선택 버튼” 을 눌러 진동모드로 변경합니다. “강도 조절 버튼” 을 눌러봅니다. 진동이 정지된 상태에서 버튼을 누르면 “진동 강도 표시” 만 변경 됩니다. |
| | 버튼을 눌렀을때 부저음이 “뽁” - “뽁” 두번 울리는지 확인합니다. | 부저음이 “뽁” 하고 한번만 울린다면 전원을 끈 후 2분뒤 다시 사용해봅니다. 증상이 계속되면 사용을 중지합니다. |

> 폐 가전제품 처리방법

> 신규 제품 구입 후 기존 제품 폐기시 (무료)

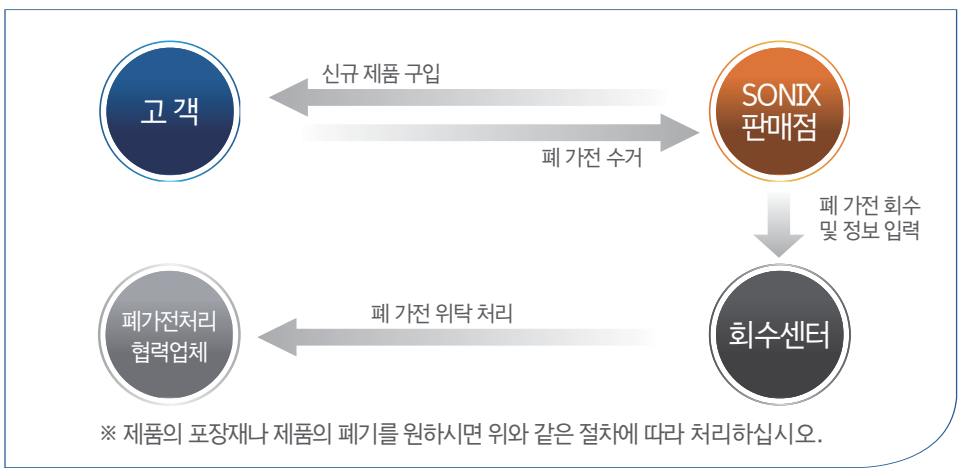

> 신규 제품 구입 없이 기존 제품 폐기시 (유료)

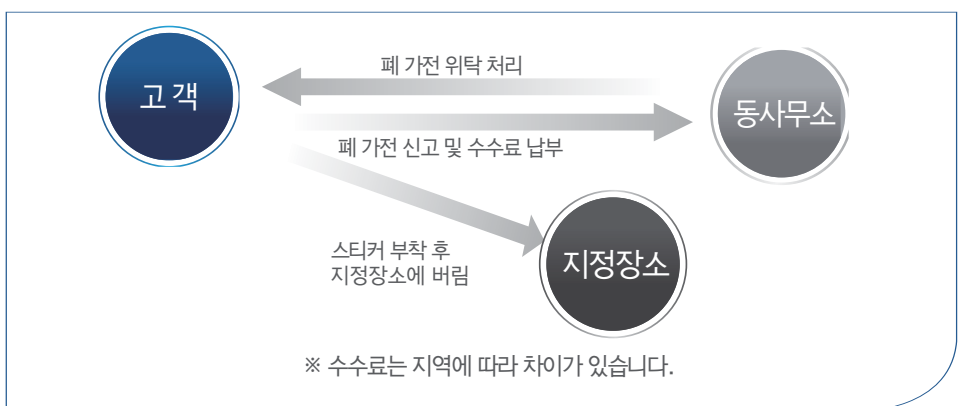

분리배출 표시제도란?

자원 재활용을 촉진하고 분리 수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여바랍니다.



> 제품 보증서

-저희 (주)소닉월드에서는 품목별 소비자 피해 보상규정
(재경경제부고지 제 2000-2호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

-서비스 요청시 (주)소닉월드 본사 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

| | |
|--------|----------|
| 제품명 | 음파진동반신욕기 |
| 구입시기 | 년 월 일 |
| 구입처 | |
| 모델명 | |
| 제품번호 | |
| 소비자판매가 | |

-보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에 피해보상은 통보일로부터
14일 이내에 해결해 드립니다.

제품 보증기간 : 제품 인도 시점부터 1년



The logo for SONIX is displayed within a white rectangular box. The word "SONIX" is written in a bold, sans-serif font. The letter "S" is blue, while the letters "O", "N", "I", and "X" are black. A thin blue line curves around the top of the "O". Below the main text, a faint, grey, semi-transparent reflection of the word "SONIX" is visible, creating a sense of depth and reflection.

SONIX

With SONIX for the people

With SONIX for the people

SONIX



주식회사 소닉월드

220-801 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 131 | TEL : 033-813-1813

<http://www.sonixkorea.com>